

دستورالعمل ارسال نمونه مدفوع بیماران فلج شل حاد به آزمایشگاه کشوری فلج اطفال

۱- نصف بند انگشت نمونه مدفوع در قوطی در پیچ دار که درب آن کامل پیچ شود قرار گیرد. به هیچ وجه قوطی نباید پر شود. به اندازه نصف بند انگشت (یا یک نخود) نمونه مدفوع کافی است.

۲- اسم بیمار روی قوطی نوشته شود. قوطی هر نمونه جداگانه در یک دستمال کاغذی پیچیده شود و جداگانه در یک نایلون یا زیپ کیپ قرار گیرد و بسته شود.

۳- از کلدباکس یا واکسن کریر با جداره ضخیم استفاده شود. کلدباکس های یونولیتی یا پلاستیکی استوانه ای که جا لوله ای دارد و جداره آن نازک است، برای حمل نمونه مدفوع مناسب نیست چون داخل آن زود گرم می شود.

۴- یخ بصورت چهار آیس پک بزرگ داخل کلدباکس گذاشته شود که اطراف نمونه را بپوشاند و در ایام تابستان سرمای نمونه را تامین کند، به خصوص وقتی نمونه از استان های جنوبی و گرمسیری که مسیر دوری باید طی کنند، ارسال می شود.

۵- برگه همراه نمونه باید خوش خط و به دقت پر شود. تاریخ ها درست نوشته شود.

۶- برگه همراه نمونه داخل کلدباکس قرار نگیرد چون آلوده می شود. برگه باید بیرون کلدباکس باشد. برگه را می توان در یک پاکت یا نایلون گذاشته و روی کلدباکس چسباند.

۷- در صورت ارسال نمونه در ایام تعطیل، فردی برای تحویل رسید در آزمایشگاه حضور ندارد. نمونه باید داخل فریزری که در اول راهروی گروه ویروس شناسی هست (روی آن برچسب زده شده) گذاشته شده و برگه روی پوشه ای که روی درب فریزر چسبانده شده قرار گیرد. لازم است در اولین روز کاری با آزمایشگاه تماس حاصل شده و از دریافت نمونه اطمینان حاصل شود. در صورت نیاز به رسید، از طریق فکس یا ایمیل یا واتساپ قابل ارسال است.

۸- در صورتی که به دلایلی مانند بیبوست یا بیهوشی بیمار، نمونه سواپ ارسال می شود، باید توجه کرد

که سواپ به صورت خشک و بدون هیچ مایع یا محیط و در یک لوله استریل در پیچ دار ارسال شود.

۹- درب دانشکده بهداشت بسته شده است. لطفا جهت تحویل نمونه از درب ورودی دانشکده پزشکی تردد فرمایند.